

TT44 NEXT GEN™

BRUKSANVISNING



1. 4-punktsbältet monteras enligt (bild 1). Axelbandet fästs undertill, längst ned på kardborren under huvudändan. Det fästs i bältet med hjälp av snabbkoppling.




2. Genom att föra snabbkopplingen uppåt (bild 2), frigörs banden och kan lugnt och kontrollerat sträckas ut. Det är väldigt viktigt att använda denna funktion när bältena skall tas bort från patienten, innan snabbkopplingen frigörs.



3. Lossa snabbkopplingarna på ena sidan av TT:n. Bältena är försedda med avlastare i plast, för att undvika tryckskador. Avlastarna består av plast och cellplast, ingen kardborre eller absorberande material.



4. Bältena bör sitta fast på ena sidan, när TT-Cover™ eller TT-Headfix™ placeras på TT:n. Vik ut och säkra TT-Cover™ på TraumaTransfer™. **OBS! Använd endast certifierade produkter för TraumaTransfer™.**

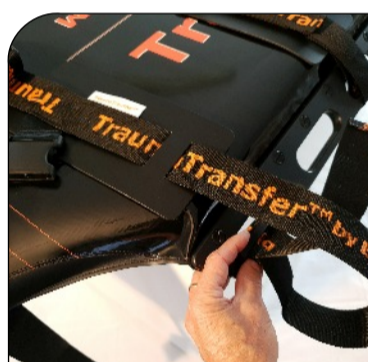

5. Flytta över patienten till TraumaTransfer™ och immobilisera och täck med TT-Cover™/TT-Headfix™. För bältenas snabbkopplingarna genom grepplisten på motsatta sidan (bild 5).



6. Klicka i snabbkopplingarna och försäkra dig om att bältet med avlastare är korrekt centred över patienten och inte för hårt ådraget.



7. När de fyra bältena med avlastare sitter på plats, klickas snabbkopplingarna fast i det översta bältet (bild 7). Var noga med att axelbandet sitter symmetriskt. Vid behov frigör genom att resa på beslaget (se bild 2).



8. Nästa steg är att spänna samtliga remmar, lika på båda sidor av TraumaTransfer™. **OBS! Kontrollera samtliga bälten för en optimal och säker immobilisering, före ALL form av förflyttning.**



ESON COMFORT
Idé-Möbler i Landeryd AB
Centrumvägen 7
SE-314 94 LANDERYD

Tel +46 (0)371-40051
info@esoncomfort.com

Copyright 2016 Eson Comfort / Idé-Möbler i Landeryd AB.

All rights reserved



ESON COMFORT
www.esoncomfort.se
"WE INVENT THE FUTURE"