

TTX NEXT GEN™

BRUKSANISNING




1. X-bältet monteras enligt (bild 1). Axelbandet fästs undertill, längst ned på huvudändans kardborre. Snabbkopplingarna öppnas och förs igenom något av grepplisternas övre handtag, på motsatt sida. Detta görs först efter att patienten är flyttad till TraumaTransfer™.




2. På övriga bälten öppnas snabbkopplingarna och banden förs igenom grepplisten (inifrån/ut). Genom att endast klicka i snabbkopplingarna på ena sidan, kan de tre bältena föras åt sidan och möjliggöra överflyttning av patient.



3. TT-Cover™ eller TT-Headfix™ med täckning placeras på TraumaTransfer™. Vik ut och säkra TT-Cover™. Flytta därefter över patienten och immobilisera, samt täck patienten. Nu kan bältena placeras på sin plats över patienten.

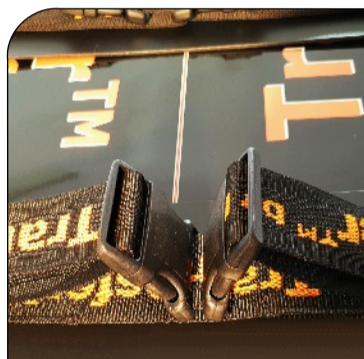

4. Det är viktigt att tillräcklig längd av bandet görs tillgängligt. Genom att resa snabbkopplingen 90 grader (bild 4), frigörs bandet för ökad längd. Bältena är försedda med avlastare i plast och är fri från kardborre och andra absorberande material.

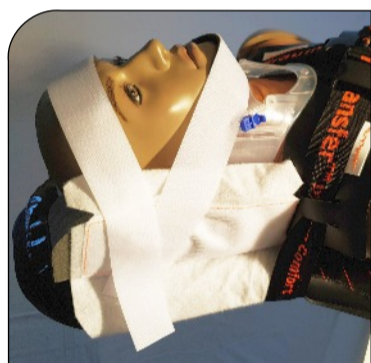


5. För X-bältets snabbkopplingar genom grepplisten på motsatta sidan (bild 5). Övriga bälten förs på motsvarande sätt genom grepplisten på motsatta sidan.



6. Klicka i snabbkopplingarna och försäkra dig om att bältena med avlastare är korrekt centrerade över patienten och inte alltför hårt åtdragna.



7. Vid behov av justering, frigör bältena genom att resa på beslagen. Sträva alltid efter att snabbkopplingarna befinner sig i mitten på avlastare och TraumaTransfer™.

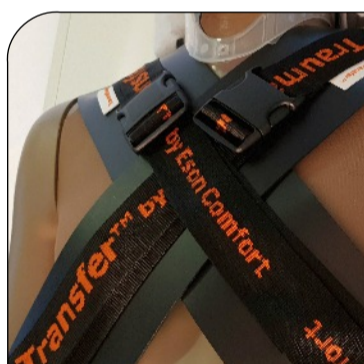

8. OBS! Kontrollera samtliga bälten för en optimal och säker immobilisering, före ALL form av förflyttning.

Använd endast certifierade produkter för TraumaTransfer™.



ESON COMFORT
Idé-Möbler i Landeryd AB
Centrumvägen 7
SE-314 94 LANDERYD

Tel +46 (0)371-40051
info@esoncomfort.com

Copyright 2016 Eson Comfort / Idé-Möbler i Landeryd AB.

All rights reserved



ESON COMFORT
www.esoncomfort.se
"WE INVENT THE FUTURE"